



BIOLABO
www.biolabo.fr
FABRICANT:
BIOLABO SAS,
Les Hautes Rives
02160, Maizy, France

Solution lavage pour TIA

Pour le nettoyage du système de mesure des analyseurs

REF CO4000 2 x 250 mL



Made In France

SUPPORT TECHNIQUE ET COMMANDES

Tel : (33) 03 23 25 15 50

support@biolabo.fr

Dernière version : www.biolabo.fr

I : correspond aux modifications significatives

USAGE PREVU

Ce réactif est réservé pour un usage professionnel en laboratoire (méthode automatisée).

Il élimine les résidus de spécimens et réactifs susceptibles de persister dans les différents éléments du système de mesure des analyseurs (gamme KENZA).

PRINCIPE

A utiliser avec les réactifs TIA (méthode immunoturbidimétrique au Latex) selon les indications de l'application pour l'analyseur utilisé

REACTIFS

R1	CS	Solution lavage pour TIA
Hydroxyde de sodium	2	%
Tween 20	0,2	%

Danger

La classification de ce produit a été réalisée conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves, Catégorie 1, H318

Met. Corr. 1: Corrosif pour les métaux, Catégorie 1, H290

Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée, Catégorie 1B, H314

La classification est due à l'hydroxyde de sodium (1 – 2,5%)

P280: Porter des gants de protection/un équipement de protection du visage/des vêtements de protection/chaussures de protection.

P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

REACTIFS ET MATERIEL COMPLEMENTAIRES

1. Equipement de base du laboratoire d'analyses médicales.
2. Analyseur automatique de biochimie Kenza One ou Kenza 240TX/ISE ou Kenza 450TX/ISE

PRECAUTIONS (1) (2)

- Consulter la FDS en vigueur disponible sur demande ou sur www.biolabo.fr
 - Vérifier l'intégrité des réactifs avant leur utilisation.
 - Elimination des déchets : respecter la législation en vigueur.
 - Traiter tout spécimen ou réactif d'origine biologique comme potentiellement infectieux. Respecter la législation en vigueur.
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif fait l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

PREPARATION DES REACTIFS

- Prêt à l'emploi
- Transvaser la quantité nécessaire dans le container dédié de l'analyseur KENZA utilisé
- Bien reboucher le flacon d'origine et stocker à 2-25°C

STABILITE ET CONSERVATION

Stocké à 2-25°C dans le flacon d'origine bien bouché, à l'abri de la lumière et en l'absence de contamination, la solution utilisée et stockée comme indiqué est stable :

Avant ouverture

- Jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

Après ouverture :

- Dans le flacon d'origine, bien rebouché, au moins 3 mois.

A bords:

- Ne pas compléter, jeter le volume non utilisé.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

CONTRÔLE DE QUALITE

- Vérifier l'intégrité des flacons avant utilisation.
- Rejeter toute solution trouble

PROCEDURE

Se référer à l'application « Réactif » de l'analyseur KENZA utilisé

PERFORMANCES

Aucune contamination croisée détectée en utilisant la solution de lavage dans les conditions indiquées.

REFERENCES

- (1) *Occupational Safety and Health Standards ; Bloodborne pathogens (29CFR1910.1030) Federal Register July 1, (1998) ; 6, p.267-280*
- (2) *Directive du conseil de l'Europe (90/679/CEE) J. O. de la communauté européenne n°L374 du 31.12.1990, p.1-12*

Fabricant	Date de péremption	In vitro diagnostic	Température de conservation	Eau déminéralisée	Risque biologique
Référence Produit	Consultez la notice	Numéro de lot	Stocker à l'abri de la lumière	Suffisant pour	diluer avec