



**BIOLABO**  
**www.biolabo.fr**  
**FABRICANTE:**  
**BIOLABO SAS,**  
 Les Hautes Rives  
 02160, Maizy, France

# CRP Calibrador Súper Alto

Para la calibración de la dosificación cuantitativa de la Proteína C-reactiva (CRP) por test Inmunoturbidimétrico

**REF** CRP CALSH1      **R1** 1 x 1 mL



**Made In France**

## SOPORTE TECNICO Y PEDIDOS

Tel: (33) 03 23 25 15 50  
 Fax: (33) 03 23 256 256

support@biolabo.fr

Última versión: www.biolabo.fr

I : corresponde a las modificaciones significativas

## USO PREVISTO

Calibrador a diluir para la calibración de la dosificación cuantitativa de la CRP por test Inmunoturbidimétrico en suero humano.  
 Utilizable en método manual y sobre autómatas con los reactivos BIOLABO **REF** CRP620E, CRP050E, **REF** K150E, K250E.

## REACTIVOS

**R1**                      **CRP CALSH1**



Calibrador Súper Alto

Origen humano

Plasmas líquido estabilizado (desfibrinado y deslipidado) suplementado en CRP purificada.

## PRECAUCIONES (1) (2)

Los reactivos BIOLABO están destinados a uso profesional en laboratorio.

- La ficha de datos de seguridad puede obtenerse por petición.
- Cada donación utilizada para la preparación de este producto ha sido analizada et ha dado resultados negativos para el antígeno Hbs y los anticuerpos de la hepatitis C y del VIH-1, VIH-2.
- Sin embargo, ningún test garantiza de forma absoluta la ausencia de todo agente infeccioso. Por medida de seguridad, tratar toda muestra o reactivo de origen biológico como potencialmente infeccioso.
- Eliminación de los desechos: respetar la legislación vigente.

Todo incidente ocurrido en relación con el dispositivo es objeto de una notificación al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el cual el usuario y/o el paciente está establecido.

## PREPARACION DE LOS REACTIVOS

Listos para el uso.

## REACTIVOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIOS

1. Reactivos BIOLABO (§ Uso previsto)
2. **REF** CRP CONTL1 o **REF** CRP CONTL5: CRP Control Bajo
3. **REF** CRP CONTH1 o **REF** CRP CONTH5: CRP Control Alto

## CONTROL DE CALIDAD

Verificar la integridad de los viales y el valor específico del lote antes de utilizar.

Utilizar conforme a las indicaciones de las instrucciones de uso del reactivo utilizado.

## ESTABILIDAD Y CONSERVACION

**Almacenado y protegido de la luz, en el vial de origen bien cerrado a 2-8°C, utilizado y conservado en las condiciones preconizadas, el calibrador es estable:**

Antes de abrir:

- Hasta la fecha de caducidad indicada en le etiqueta.

Después de abrir:

- Transferir la cantidad necesaria, cerrar bien y almacenar a 2-8°C.
- Bien cerrado en el vial de origen, por lo menos 6 semanas en ausencia de contaminación.

**No congelar.**

## MODO DE EMPLEO

Utilizar conforme a las indicaciones de las instrucciones de uso del reactivo utilizado.

## VALORES DE CALIBRACION (3)

- Los valores de los calibradores son trazables sobre un material de referencia (RPPHS/CRM470) de la Federación Internacional de Química Clínica (IFCC).
- **El valor específico del lote** está indicado en la etiqueta del vial.

## LIMITES

Los factores susceptibles de perturbar los resultados son la contaminación bacteriana, la programación del aparato, el respeto de las temperaturas...

## REFERENCIAS

- (1) *Occupational Safety and Health Standards ; Bloodborne pathogens (29CFR1910.1030) Federal Register July 1, (1998) ; 6, p.267-280*
- (2) *Directive du conseil de l'Europe (90/679/CEE) J. O. de la communauté européenne n°L374 du 31.12.1990,p.1-12*
- (3) *TIETZ N.W. Text book of clinical chemistry, 3<sup>rd</sup> Ed. C.A. Burtis, E.R. Ashwood, W.B. Saunders (1999) p.520*

Fabricante	Fecha de caducidad	Diagnostico in vitro	Temperatura de conservación	Agua desmineralizada	Riesgo biológico
<b>REF</b>		<b>LOT</b>			→
Referencia Producto	Consultar las instrucciones	Número de lote	Almacenar protegido de la luz	Suficiente para	diluir con